


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



БОКС PS.86.00 ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОГО МОТОРА

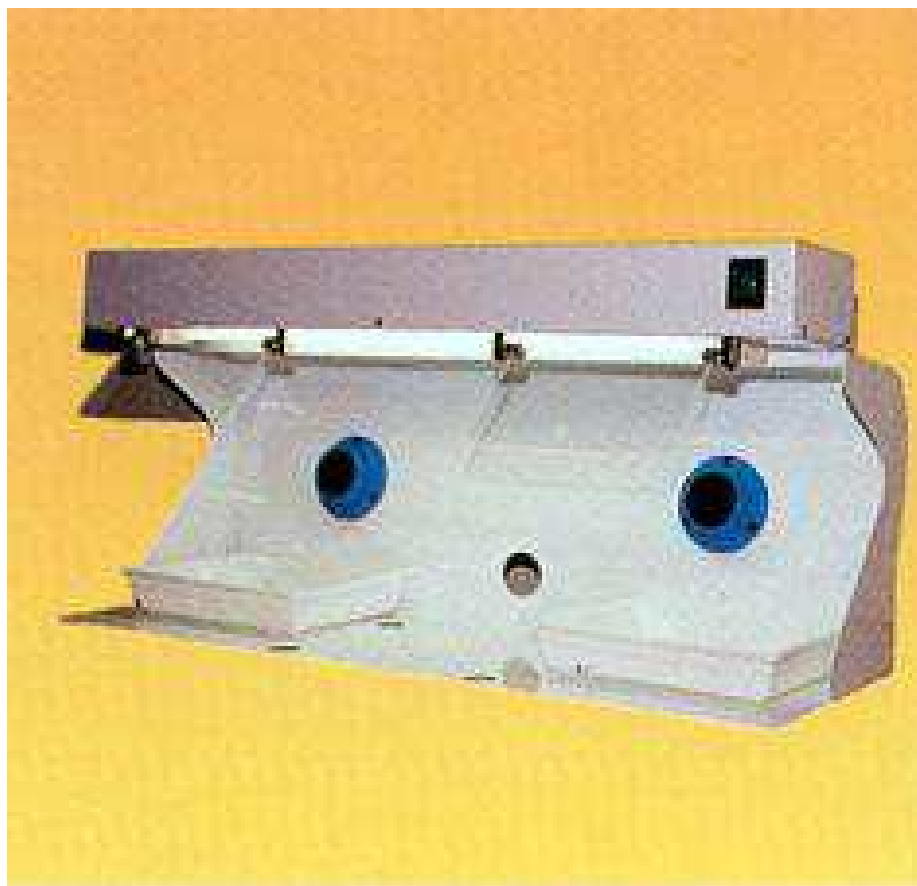

В данной инструкции описаны основные требования по безопасности и уходу за оборудованием.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

- 1.1.1 Предупреждения.
- 1.1.2 Предосторожности
- 1.1.3 Общие рекомендации

ЧАСТЬ II ОПИСАНИЕ АППАРАТА

- 2.1.1 Описание внешнего вида
- 2.1.2. Описание системы освещения

ЧАСТЬ III УСТАНОВКА И ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 3.1.2 Инструкции по установке
- 3.1.3 Инструкции по использованию

ЧАСТЬ IV УХОД ЗА АППАРАТОМ

- 4.1.1 Замена лампы

ЧАСТЬ I ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

1.1.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Перед подключением аппарата в сеть убедитесь, что параметры электросети соответствуют указанным на табличке аппарата.
Напряжение: 220 V - 50 HZ

1.1.2 ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- a) Аппарат предназначен только для работы с материалами, предназначенными для зуботехнических работ.
- b) Никогда не снимайте защитные экраны. При работе рекомендуется использовать защитные очки.
- c) Защитные экраны необходимо чистить и менять время от времени, что улучшает видимость.
- d) Убедитесь, что параметры вашей электрической сети соответствуют стандартам ЕС 73/23.



**ОМЕС НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОКСА ВА.86.F/V - ВА.86.2F - ВА. 86.2V**

1.1.3 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



- a) При получении аппарата проверьте целостность блока и затем удостоверьтесь, что аппарат не поврежден (в случаях неудовлетворительной транспортировки).
- b) Точно следуйте инструкциям по монтажу аппарата.
- c) Аппарат должен использоваться только квалифицированными рабочими. Перед использованием прочитайте инструкцию.
- d) Аппарат поставляется вместе со следующими комплектующими:
 - 2 контейнера для сбора грязи
 - Инструкция по эксплуатации, которая должна ВСЕГДА ПРИЛАГАТЬСЯ к аппарату, даже если он продается как подержанный
 - Сертификат соответствия

ЧАСТЬ II **ОПИСАНИЕ АППАРАТА**

2.1.1 ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА

Корпус аппарата выполнен из железа и термически обработанной стали.

2.1.2 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Область рабочего стола освещается съемной лампой дневного света.

ЧАСТЬ III **УСТАНОВКА И ИНСТРУКЦИИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ**

3.1.1 ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ



Разместите Бокс PS.86.00 на ровной устойчивой поверхности. Расстояние от задней стенки аппарата до стены должно быть не меньше 10 см, для нормального выхода воздуха. Подключите его к розетке. Установите пластиковые емкости.

3.1.2 ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Подсоедините аппарат к сети. На передней панели аппарата есть выключатель света, нажмите для включения подсветки. Включите в сетевую розетку разъем от шлифовального мотора

ЧАСТЬ IV **УХОД ЗА АППАРАТОМ**

4.1.1 ЗАМЕНА ЛАМПЫ



Перед заменой ламп, отсоедините аппарат от сети. Замену производите только когда лампы остыли. Замените старую лампу новой, которая должна быть соответственного типа.



ПАСПОРТ

На изделие: устройство для очистки и полировки зубных протезов PS.86.00

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «O.M.E.C. S.N.C. di Carnevale Renato & C.», Via dell' Artigianato 3/5/7, 20053,
Muggio (Milano), Italy, Италия

Заводской номер: _____

Год выпуска: _____

Средний срок службы: _____

Технические параметры

Модель: PS.86.00

Назначение: устройство для очистки и полировки зубных протезов PS.86.00

Электрическое питание:

Номинальное напряжение, В/Гц: 220/ 50

Габариты Ш x В x Г, мм: 730 x 340 x 230

Вес, кг: 10

Срок и условия гарантии

Гарантий 1 год. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся и расходные части: прокладки, лампы, источники питания и т.п.

По вопросам технической поддержки, а также гарантийного ремонта просим обращаться в отдел оборудования ООО «Стоматорг» по телефонам: (495) 642-64-31, (495) 335-92-91

По вопросам послегарантийного ремонта оборудования просим обращаться в ООО фирма «Стоматорг сервис», 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.12, кор.3

Тел/факс: (499) 744-34-80, (499) 744-33-85, (495) 505-56-47, E-mail: stomservice@globonet.ru, 9788582@mail.ru

Покупатель: _____

Продавец: ООО «Стоматорг», юридический адрес: 119048, Москва, ул. Ефремова, 12, стр. 2;
почтовый адрес: 117485 Москва, ул. Профсоюзная, 88/20

Дата составления паспорта: _____

Подпись ответственного лица

М.П.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 августа 2008 года № ФСЗ 2008/02449

На медицинское изделие
Устройство для очистки и полировки зубных протезов

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"О.М.Е.С. с.н.с. ди CARNEVALE RENATO энд Ко.", Италия,
O.M.E.C. s.n.c. di CARNEVALE RENATO & C., Via dell' Artigianato n. 3/5/7,
Muggio 20053 (MB), Italy

Производитель
"О.М.Е.С. с.н.с. ди CARNEVALE RENATO энд Ко.", Италия,
O.M.E.C. s.n.c. di CARNEVALE RENATO & C., Via dell' Artigianato n. 3/5/7,
Muggio 20053 (MB), Italy

Место производства медицинского изделия
O.M.E.C. s.n.c. di CARNEVALE RENATO & C., Via dell' Artigianato n. 3/5/7,
Muggio 20053 (MB), Italy

Номер регистрационного досье № 27901 от 24.06.2008

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5220

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 06 августа 2008 года № 6294-Пр/08
и приказом от 22 августа 2016 года № 8536-о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0023029

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 августа 2008 года № ФСЗ 2008/02449

Лист 1

На медицинское изделие

Устройство для очистки и полировки зубных протезов:

Исполнения: BA.86.2F, BA.92.00, GP.92.3, GP.92.5, PS.86.00, VIP.2.00, MS.1.00,
MS.2.00, MS.3.00.

Z

Приказом от 22 августа 2016 года № 8536 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0024699

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматорг» (ООО «Стоматорг»)

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано: Межрайонная Инспекция МНС России № 39 по г. Москве от 09.08.2002, ОГРН: 1027739057576

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Место нахождения: 119048, Россия, город Москва, улица Ефремова, дом 12, строение 2.
Фактический адрес: 117485, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 88/20, телефон: +74956209734, факс: +74956209734, e-mail: mail@stomatorg.ru

адрес, телефон, факс

в лице Генерального Директора Девлетбаевой Эльмиры Хамзиновны

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что Устройство для очистки и полировки зубных протезов, исполнения: BA.86.2F, BA.92.00, PS.86.00, VIP.2.00

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

Серийный выпуск, Код ОКП 94 5220, Код ТН ВЭД 8424309000

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН))

Изготовитель: "O.M.E.C. s.n.c. di CARNEVALE RENATO & C.", место нахождения и фактический адрес: Италия, Via dell' Artigianato n. 3/5/7, Muggio 20053 (MB), Italy.

наименование изготовителя, страны и т.п.

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014

обозначение нормативных документов, соответствие требованиям которых подтверждено данной декларацией, с указанием разделов (пунктов, подпунктов) этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги)

Декларация о соответствии принята на основании:

Протокол испытаний № 09/032-2015 от 18.09.2015

Испытательная лаборатория Автономная некоммерческая организация "Центр качества, эффективности и безопасности медицинских изделий", аттестат аккредитации RA.RU.21MD11, от 07.04.2015, срок действия - бессрочный, 125363, РОССИЯ, город Москва, ул. Новопоселковая, 6, 217, тел. +74951342727, факс +74951342727, e-mail: info@KEBMI.ru
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02449 от 06.08.2008 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 18.09.2015

Декларация о соответствии действительна до 17.09.2018



подпись

Э.Х.Девлетбаева

инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя (уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер Аттестат аккредитации № RA.RU.11PC52 от 11.12.2014, срок действия - бессрочный, выданный Федеральной службой по аккредитации, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр оценки соответствия»

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

адрес: 127204, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 163, строение 8, комн.507

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС ИТ.РС52.Д00132 от 18.09.2015

дата регистрации и регистрационный номер декларации



подпись

М.В. Иванов

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации