

**Тест на наличие  
антигена SARS-COV-2  
«COVID-19 Ag»**

**Colloidal Gold**

# О Продукте

Экспресс тест на выявление антигена SARS-CoV-2 – способ диагностики COVID-19 с первого дня заболевания методом иммунохроматографического анализа за 15 минут.



98,3%

Чувствительность

99,1%



Точность

100%


Специфичность

# Одобрено

Тест прошел испытания и получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 30.03.2021г. №РЗН 2021/13922.

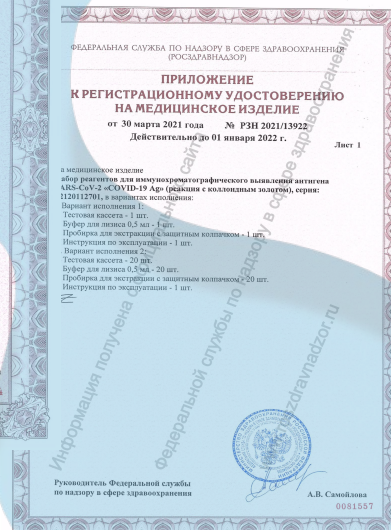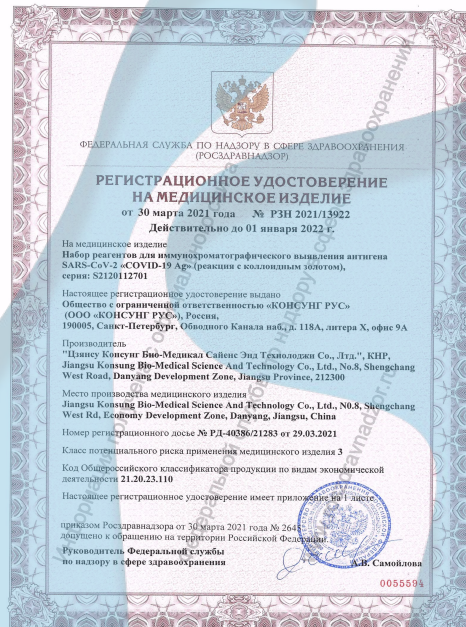


# Преимущества экспресс-теста

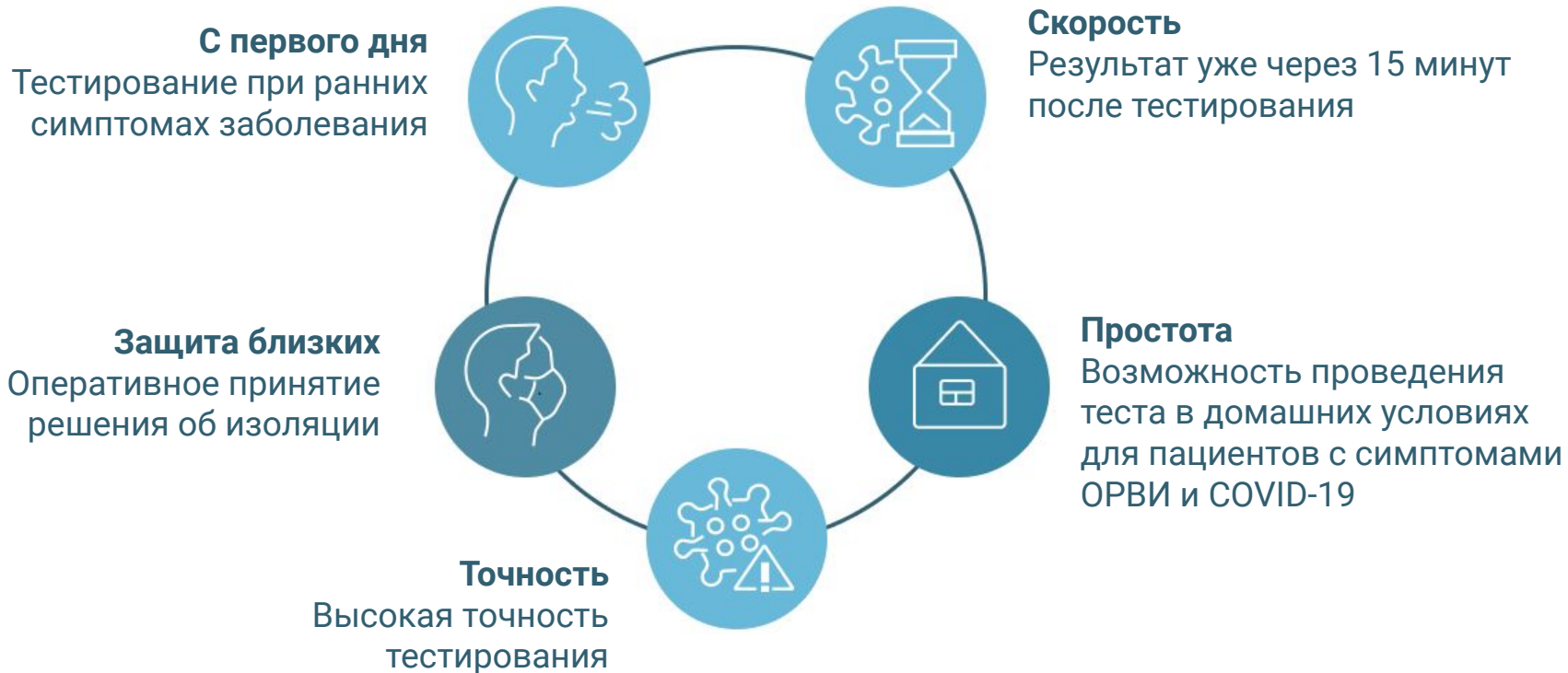

# Варианты упаковки и комплектация

## 1. Индивидуальная упаковка

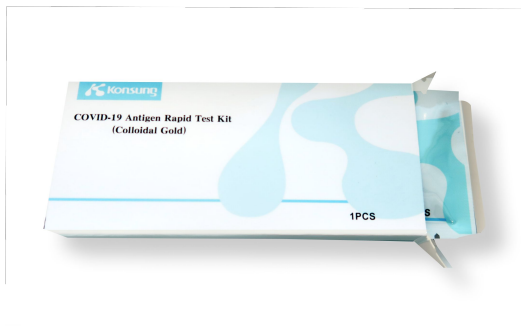


Тестовая кассета 1 шт.  
Тампон для забора мазка 1 шт.  
Буфер для лизиса 1 шт  
Насадка с капельницей 1 шт.  
Инструкция 1 шт.

## 2. Упаковка 20 шт.




Тестовая кассета 20 шт.  
Тампон для забора мазка 20 шт.  
Буфер для лизиса 20 шт.  
Насадка с капельницей 20 шт.  
Инструкция 1 шт.  
Картонная подставка 1 шт


# Проведение теста

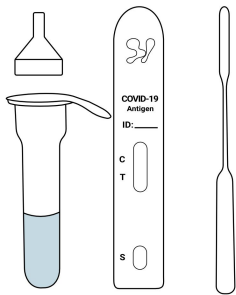


- 1** **Распакуйте и подготовьте к тестированию содержимое упаковки.** Вам понадобится стерильный тампон, буфер для лизиса, насадка с капельницей и тест кассета.

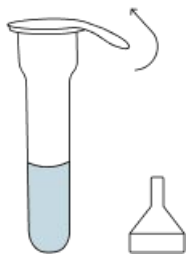

- 3** **Снимите защитную пленку с буфера.** Потяните вверх за специальный язычок и откройте буфер.

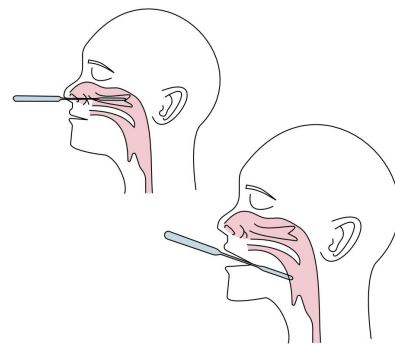


- 2** **Возьмите мазок из носа или носоглотки стерильным тампоном.** Введите тампон до стенки носоглотки или полости рта, проведите по поверхности и затем выньте.

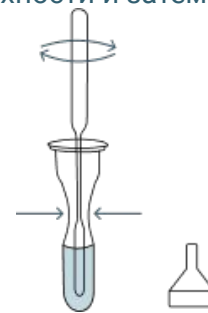


- 4** **Вставьте тампон с мазком в буфер.** Сжимайте флакон и проверните 5 раз тампоном внутри.

# Проведение теста

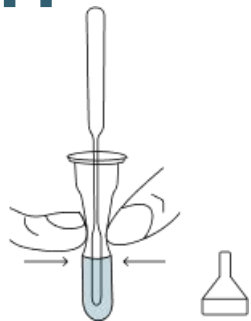

## 5

**Сожмите тампон в буфере и извлеките его.**  
Убедитесь, что вся жидкость с тампона стекла в буфер.


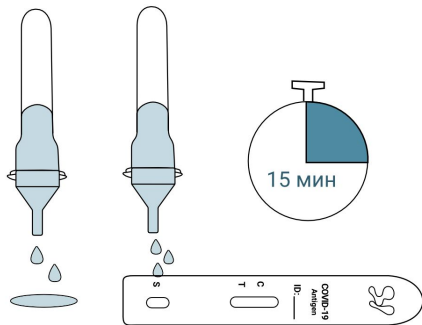


## 7

**Переверните буфер и слейте 2 капли образца (мимо кассеты).**  
Налейте 3 капли образца из буфера на тест-кассету. Подождите 15 минут.

## 6

**Плотно вставьте насадку с капельницей в буфер.**  
Дайте постоять буферу 1 минуту.

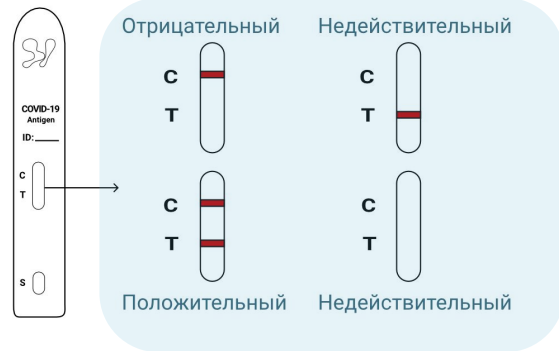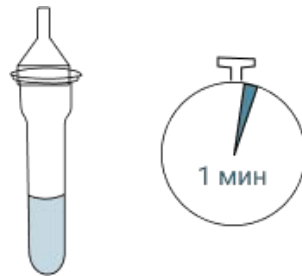


## 8

**Проверьте результат через 15 минут.**  
**Внимание,** не проверяйте результат больше, чем через **30 минут**, так как он может быть недостоверным.




# Кому подходит тест

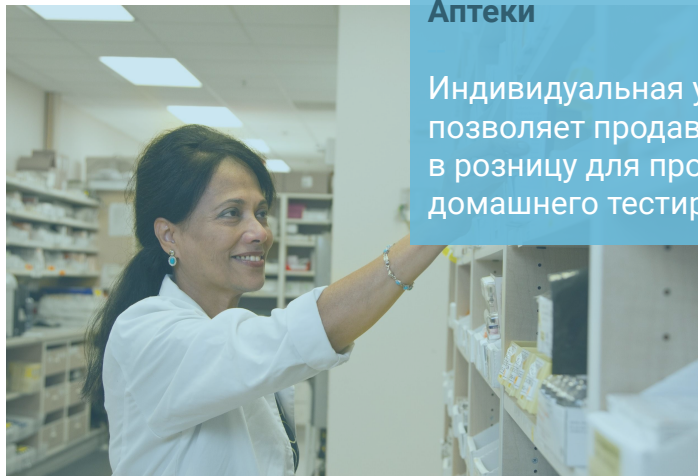

## Аптеки

Индивидуальная упаковка позволяет продавать тест в розницу для проведения домашнего тестирования.

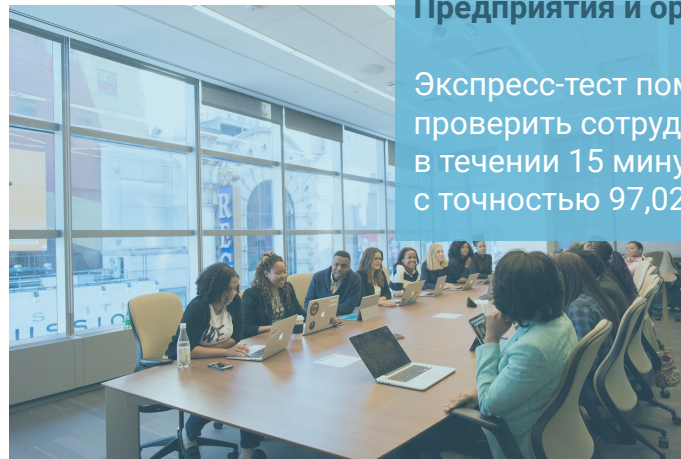

## Предприятия и организации

Экспресс-тест поможет проверить сотрудника в течении 15 минут с точностью 97,02%



## Лаборатории и медицинские учреждения

Экспресс-тесты подходят для выездных проверок и для тестирования в лабораториях.