

Прибор для обработки инструментов гласперленовый

Руководство по эксплуатации

Только для профессионального использования!

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Назначение: Стерилизатор гласперленовый предназначен для оперативной обработки рабочей поверхности инструментов и аксессуаров (щипчики, ножницы, пинцет и пр.) путем кратковременного погружения последних в среду нагретых до высокой температуры мелких стеклянных шариков. Обеззараживает инструменты и обеспечивает безопасность рабочего процесса.
- Описание: Компактный, высокоэффективный прибор. Конструкция прибора обеспечивает удобство и безопасность использования.
Дополнительная комплектация: гласперленовые шарики.
- Технические характеристики:
- Размеры: высота 16 см, диаметр основания 16 см
 - Глубина ёмкости: 6.5 см.
 - Напряжение 220-240 В; 50 Гц
 - Мощность: 100 Вт
 - Максимальная температура среды стерилизации 180 °С
 - Функция поддержания температуры
- Порядок эксплуатации:
1. Подключите прибор к электросети. Поместите гласперленовые шарики в емкость, закройте крышку.
 2. Переведите кнопку включения прибора, расположенную спереди, в положение «I», загорится индикатор нагрева. Через 10-12 минут температура среды стерилизации достигнет максимума и индикатор погаснет. Благодаря функции поддержания температуры, при её снижении стерилизатор автоматически включается и вновь загорается индикатор нагрева прибора.
 3. Откройте крышку, аккуратно поместите металлическую часть инструмента или аксессуара в шарики. Не погружайте пластиковые и деревянные части инструментов!
Внимание! Будьте осторожны! Высокая температура!
 4. Время стерилизации до 30 секунд.
 5. Переведите выключатель в положение «O», осторожно выньте инструменты.
- Меры предосторожности:
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению питания стерилизатора. В противном случае может произойти замыкание.
 - Устанавливайте аппарат только на твердую, ровную и устойчивую поверхность.
 - Не подвергайте аппарат воздействию высокой температуры. Не храните и не используйте в местах с повышенной влажностью. Не помещайте в воду или какую-либо другую жидкость. Если прибор упал в воду или намок, не прикасайтесь к воде и устройству – немедленно отключите от электросети.
 - Запрещается использование аппарата в случае появления механических повреждений, нарушения изоляции шнура питания. Запрещается открывать корпус подключенного к электросети прибора.
 - Не оставляйте работающий аппарат без присмотра. Запрещается использовать и хранить аппарат в месте, доступном для детей.
 - Не используйте абразивные моющие средства для очистки прибора во избежание его повреждения
 - Не извлекайте инструменты из подключенного к сети стерилизатора.
 - Используйте прибор строго по назначению.

Внимание! Высокое напряжение! Разбирать прибор категорически запрещается. При нарушении данного условия гарантия аннулируется. В случае поломки обращайтесь по месту покупки прибора.

Произведено: Изготовлено Ningbo Meinuo Electrical Appliance & Technology Co., Ltd (№ 588, South Area, Yangshan Village, Ditang Street, Yuyao City, Ningbo, Zhejiang, China, Китай)

Товар сертифицирован