

Ответы на часто задаваемые вопросы по аппарату Ellisys Plus S

<p>- Как аппарат работает? - Что из себя представляет аппарат? - Какой принцип действия аппарата?</p>	<p>Принцип работы аппарата ELLISYS PLUS S: Комбинированная технология омоложения RF-лифтинга ELLISYS PLUS S основана на двух механизмах воздействия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Термическое повреждение с помощью высокоточного RF воздействия; - Механическая травма с помощью позолоченных микроигл. <p>Омоложение на аппарате Ellisys Plus S достигается благодаря травме на уровне дермы, где находится высокая концентрация фибробластов, что и приводит к интенсивному неоколлагенезу и ремоделированию кожи.</p> <p>При контакте насадки с поверхностью кожи происходит захват участка кожи вакуумной системой Smart Vacuum. Пока не достигнуто нужное давление, иглы не срабатывают. Эта система обеспечивает равномерное проникновение всех игл на заданную глубину и снижает болезненные ощущения во время процедуры.</p>
<p>- Насколько процедура безболезненна?</p>	<p>Система Smart Vacuum обеспечивает равномерное проникновение всех игл на заданную глубину и снижает болезненные ощущения во время процедуры даже у самых чувствительных пациентов.</p>
<p>- Какой период реабилитации после процедуры?</p>	<p>У процедуры ультракороткий период реабилитации - до 60 мин может быть небольшое покраснение в зоне воздействия.</p>
<p>- Какие показания к применению аппарата?</p>	<p>Показания к применению микроигльчатого RF-лифтинга:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Омоложение кожи лица и тела; • Нехирургический лифтинг; • Улучшение эластичности и упругости кожи; • Разглаживание морщин; • Коррекция шрамов и рубцов; • Лечение акне и постакне; • Уменьшение расширенных пор; • Удаление растяжек; • Лечение гравитационного птоза; • Выравнивание рельефа и цвета кожи.
<p>- Насколько безопасна процедура микроигльчатого RF-лифтинга?</p>	<p>Микроигльчатый RF-лифтинг ELLISYS PLUS S – это всесезонная процедура без риска гиперпигментации SMART-технологии индивидуально определяют область воздействия на лице и теле, а предустановки в настройках</p>

	аппарата предотвращают ошибки специалиста.
- Что за иглы используются в аппарате?	Каждая игла имеет позолоченное напыление и уникальную лазерную заточку с конфигурацией кинжала, прокол = самозаточка. Микроиглы проникают в глубину кожи от 0,5 до 3,5 мм.
- Когда виден результат от процедуры на ELLISYS PLUS S?	Через 3 недели после процедуры начинает активно работать клетки, которые отвечают за построение новых волокон выработки коллагена. Через 1,5 месяца наступает полное обновление коллагеновых структур.
- Сколько требуется процедур?	Количество процедур для каждого пациента подбирается индивидуально и зависит от типа проблемы, текущего состояния кожи, возрастных изменений, индивидуальных особенностей, морфотипа старения и поставленных перед специалистом задач. В среднем, для комплексного омоложения лица требуется от 2х до 5 процедур, а для удаления рубцов, постакне от 4х до 6 процедур.
- В чем отличие от лазерных шлифовок?	При лазерной шлифовке происходит выпаривание верхних слоёв кожи. При таком нагреве базального слоя, существует высокий риск образования поствоспалительной гиперпигментации. На аппарате Ellisys, работая на изолированных иглах, нагрев происходит ниже базальной мембраны, тем самым риск образования гиперпигментации практически отсутствует. Омоложение на аппарате Ellisys Plus S достигается благодаря травме на уровне дермы, где находится высокая концентрация фибробластов, что и приводит к интенсивному неоколлагенезу и ремоделированию кожи.